

ЗМІСТ

1. ВСТУП
2. ЗМІСТ
3. ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ
4. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИЛАДУ
5. ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ
6. ІНСТРУКЦІЇ З ЧИЩЕННЯ
7. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
8. УТИЛІЗАЦІЯ БАТАРЕЙОК ТА ПРИСТРОЮ

1. ВСТУП

Вітаємо вас із придбанням ергономічного назального аспіратора з живленням від батарейки. Він дозволить вашому малюкові відчувати себе краще, легко і швидко очищаючи ніс дитини від слизових виділень. Перед початком використання пристрою уважно ознайомтеся з усіма інструкціями в цьому посібнику. Зберігайте цей посібник для подальших звернень, так як воно містить важливу інформацію. **Описані в цій інструкції по експлуатації функції можуть змінюватися без попереднього повідомлення.**

2. ЗМІСТ

- 1 Основний блок назального аспіратора
- 2 Силіконових наконечника різного розміру
- 2 Запасних силіконових кільця
- 1 інструкція та гарантія

При відсутності будь-яких зазначених компонентів зверніться до магазину, в якому ви придбали прилад.

3. ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

1. Цей пристрій не є іграшкою; не дозволяйте дітям гратися з ним.
2. Пристрій призначений для очищення носа; не використовуйте його для чищення рота або вух дитини.
3. Завжди ретельно очищайте та висушуйте пристрій перед і після кожного використання.
4. Пристрій не є водонепроникним, його чистка повинна виконуватися згідно з інструкціями, наведеними в розділі «Інструкції з чищення».
5. Не вставляйте силіконовий наконечник занадто глибоко в ніс.
6. Не використовуйте пристрій занадто довго. Для чищення носа досить декількох секунд.
7. Не використовуйте пристрій при наявності в носі ранок, ознаках запалення або носовій кровотечі.
8. У разі інфекції, високої температури, подразнення носу або кровотечі не використовуйте пристрій і проконсультуйтеся у лікаря.
9. Пристрій призначений для індивідуального використання.
10. Силіконовий наконечник є робочою частиною приладу.
11. Не дозволяється модифікувати пристрій. Будь ласка, майте на увазі, що зміни і модифікації, виконані в пристрої не технічною службою MINILAND, тягнуть за собою втрату гарантії на прилад.
12. Робочий цикл: 30 секунд ВКЛ. / 2 хвилини ВИКЛ.
13. Замініть батарейки при зменшенні сили всмоктування.

Попередження про батарейки:

Використовуйте тільки алкалінові батарейки.

1. Не використовуйте одночасно старі та нові батарейки.
2. Не змішуйте алкалінові, стандартні (вугільно-цинкові) і акумулятори (нікеле-кадмієві) батарейки.
3. Рекомендується використовувати тільки батарейки однакового або аналогічного типу.
4. Дотримуйтеся полярності при установці батарейок.
5. Витрачені батарейки слід вийняти з устрою.
6. Перед установкою батарейок переконайтеся, що всі поверхні контактів чисті.
7. При установці батарейок неправильного типу існує небезпека вибуху.

8. Виймайте батарейки з пристрою, якщо він зберігається протягом тривалого часу без використання.

4. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИЛАДУ

4.1. ОПИС КОМПЛЕКТУЮЧИХ (Малюнок 1)

1. Силіконовий наконечник для дорослих
2. Силіконовий наконечник для дітей і немовлят
3. Контейнер для слизу
4. Силіконові кільця
5. База
6. Основний корпус
7. Кнопка
8. Відсік для батарейок

5. ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ (Малюнок 2)

1. Зніміть кришку відсіку для батарейок (8) з основного корпусу (6), як показано на зображенні.
2. Вставте 2 лужні батарейки типу AA по 1,5 Вольт (не входять в комплект), звертаючи увагу на полярність, як показано значками на самому відсіку для батарейок.
3. Переконайтеся в тому, що силіконові кільця відсіку для батарейок (8) розташовані правильно і закрийте кришку, як показано на схемі, до характерного "клацання".
4. Виберіть відповідний силіконовий наконечник (1, 2), виходячи з розміру носової порожнини, в яку збирається його вставити.
5. Переконайтеся, що силіконовий наконечник (1, 2) правильно розташований щодо контейнера для збору слизу (3).
6. Вставте силіконовий наконечник (1, 2) в носову порожнину, будьте обережні, не слід вводити його занадто глибоко.
7. Утримуйте кнопку (7) протягом кількох секунд, щоб витягти слиз. Відпустіть кнопку, коли процес вилучення слизу закінчиться.
8. Повторіть процедуру у іншій носовій порожнині, якщо це необхідно.

УВАГА: Якщо накопичена кількість зібраної слизу наближається до максимальної місткості контейнера (близько 4 мл), виконайте кроки, описані в розділі 6 - ІНСТРУКЦІЇ З ОЧИЩЕННЯ для очищення приладу перед подальшим його використанням. Не продовжуйте користуватися пристроєм, поки його не очистили, якщо слиз близька до рівня отвору в каналі (проілюстровано на малюнку 3)

6. ІНСТРУКЦІЇ ІЗ ЧИЩЕННЯ (Малюнок 4)

1. Переконайтеся, що кришка відсіку для батарейок (8) правильно закрита.
2. Зніміть силіконовий наконечник (1, 2) .
3. Від'єднайте контейнер для слизу (3) за допомогою великого та вказівного пальців, як показано на зображенні.
4. Зніміть два силіконових кільця (4) з назального аспіратуру.
5. Вимийте всі деталі приладу теплою водою з милом. Ви можете розмістити основу носового аспіратура (5) безпосередньо під краном, щоб промити його.
6. Зберіть всі деталі, як показано на зображенні.
7. Переконайтеся, що всі деталі з'єднані належним чином, і вирівняйте вказані позначки. Якщо кількість зібраного слизу перевищило максимальний рівень контейнера для її збору (рівень отвору каналу) під час використання назального аспіратура буде спостерігатися вихід слизу з отвору для виходу повітря (малюнок 5):
 1. Переконайтеся, що кришка відсіку для батарейок (8) правильно закрита.
 2. Вийміть силіконовий наконечник (1, 2) і контейнер для збору слизу (3).
 3. Помістіть основу назального аспіратура в чисту воду, як показано на малюнку. Утримуйте кнопку (7) натиснутою протягом 15 секунд, щоб очистити внутрішній повітряний насос. Вода буде текти у напрямку, зазначеному на зображенні.
 4. Змініть воду і повторіть крок 3 кілька разів, якщо це буде необхідно.
 5. Закінчивши промивання, витягніть назальний аспіратор з води. Натискайте кнопку (7) протягом приблизно 30 секунд поки внутрішній повітряний насос не висохне.

6. Просушіть зовнішню частину носового аспіратора і зберіть всі деталі.

7. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Робоче середовище:
 - Температура: 5 °C ~ 40°C
 - Вологість: 15% ~ 93%
- Умови зберігання і транспортування:
 - Температура: -10 ~ 50°C
 - Вологість: \leq 93%
- Живлення: 2 лужні батарейки AA 1,5 В
- Термін зберігання: 5 років






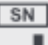

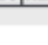
8. УТИЛІЗАЦІЯ БАТАРЕЙОК ТА ПРИСТРОЮ

- Перед утилізацією назального аспіратора вийміть з нього батарейки і утилізуйте їх належним чином.
- Не змішуйте продукти, марковані перекресленим символом сміттевого контейнера, з побутовими відходами.



- Для правильного збору та переробки цих продуктів здавайте їх в пункти збору, створені з цією метою місцевими властями. Ви також можете звернутися до продавця, який продав вам товар.

СТАНДАРТНЫЕ СИМВОЛЫ

-  · Внимание: Прочитайте руководство по эксплуатации для пользователя!
-  · Рабочая часть устройства типа BF
-  · Утилизация в соответствии с Директивой 2012/19/EU (WEEE)
-  · Соответствует требованиям европейской Директивы о медицинских аппаратах (93/42/ЕЕС) с поправками, внесенными директивой 2007/47/ЕС. Уполномоченный орган 0120: SGS United Kingdom Limited
-  · Код партии
-  · Серийный номер
-  · Название и адрес производителя
-  · Уполномоченный представитель в Европейском сообществе